


# Návod k použití


## Vysátí plodových vod:

Nasadte masku se žlutým nástavcem na širší konec pumpy.

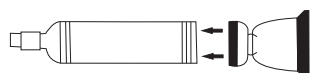

Přiložte masku na čumák telete a ujistěte se, že kolem těsnící gumy neuniká vzduch.

4-5x zapumpujte pro vysátí plodových vod z dýchacích cest.

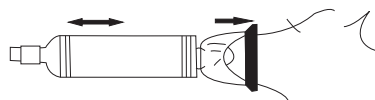


Opláchněte vodou s čistícím prostředkem, potom samotnou vodou a nechejte uschnout.

## Provedení umělého dýchání:

Nasadte masku s černým nástavcem na užší konec pumpy.

Položte masku na čumák telete a ujistěte se, že kolem těsnící gumy neuniká vzduch.

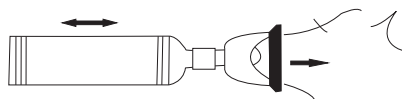

Po každém zapumpování vyčkejte 5 sekund a to celé opakujte 5x.

Pokud tele stále nedýchá, otočte ho na druhý bok a proveďte resuscitaci znovu.

Resuscitátor dostává z plic oxid uhličitý a při každém zapumpování dostává dovnitř čistý vzduch.



Dubovsko 277

76312 Vizovice

[www.almvizovice.cz](http://www.almvizovice.cz)

e-mail: [info@almvizovice.cz](mailto:info@almvizovice.cz)

tel.: 606 255 251/577 454 459