

### Bezpečnostní upozornění a údržba:

Před uvedením přístroje Squeeze Chute do provozu, si prosím, udělejte několik minut čas a seznámte se podrobně s nutnými bezpečnostními opatřeními.

1. Z důvodu rozměrů a váhy klece je kladen důraz na opatrnost při manipulaci a je požadován odpovídající přístroj (přední nakladač). Prosím dbejte na to, že výsledkem by mohli být nepřiměřená zranění zad nebo svalů.
2. Prosím dbejte na to, že při zacházení se zvířetem se vždy může skrývat nebezpečí, neboť jsou nevyzpytatelná. Proto je třeba vždy kladen důraz na opatrnost a vyvarovat se tak zranění.
3. Když pracujete s klecí Squeeze Chute, dbejte prosím na to, aby žádná osoba nestála u pravého bočního východu nebo před hlavovými vrátky. Boční dvířka se otevírají velmi vzletně a mohlo by dojít ke zranění. Kromě toho může být riskantní, nacházet se v prostoru východu, jakmile zvíře opouští klec, neboť se nedá vždy předpokládat jeho reakce.
4. Prosím dbejte na to, aby byl boční východ po vypouštění zvířete opět správně uzavřen, předtím než další zvíře vstoupí do tohoto prostoru. Nesprávně uzavřený boční vchod může být pro okolostojící osobu nebezpečný.
5. Po ukončení práce je nutné zařízení omýt vodou případně vhodným mycím prostředkem pro zabránění korozivního působení moči a výkalů – nedoporučujeme používat vysokotlaké mytí. Věnujte pozornost také mazání zámků (2 zámků na hlavových vrátkách, 1 zámek nad klecí) olejem (např. DW40). Nepoužívejte žádný tuk, neboť by mohl poškodit funkčnost a zámků by již potřebně nedržely.



## Zadní dveře

Zadní dveře slouží k přístupu zvířete v kleci. Zadní dveře mohou být obsluhovány pomocí 2 pák na levé horní straně klece. Zadní dveře se po každém zvířeti uzavírají, aby žádné další zvíře nemohlo vniknout do klece, během toho, když je jedno zvíře již v kleci ošetřováno. Abyste mohli zadní dveře otevřít, zatáhněte jednou z pák směrem dolů. Jakmile jsou páky stracheny dolů, nachází se zadní dveře v zafixované otevřené pozici. Abyste mohli zadní dveře opět uzavřít, zatlačte jednu z pák opět nahoru. Jakmile se páky nachází v kolmé vysoko postavené pozici, jsou dveře kompletně uzavřeny a zafixovány. Zadní dveře nabízejí také možnost, otevřít pouze jednu stranu dveří. To usnadňuje práci s telaty. K tomu je určený klín, který se vysune a nachází se na horním konci dveří na vnitřní straně klece. Tak se otevře pouze pravá strana zadních dveří. Abyste mohli opět otevřít oboje dveře, uzamkněte dveře a zastrčte klín opět zpět do příslušné díry. Olejujte prosím čas od času ohyb spojení a dbejte na to, aby byly spodní vodící kolejnice zbaveny nečistot, aby bylo dosaženo optimální funkčnosti.



## Boční východ

Aby bylo možné otevřít boční východ, zatáhněte za lano, které se nachází na pravé straně hned za hlavovými vrátky. Abyste boční stranu mohli opět uzavřít, sklopte páku k uzavření bočního východu tak, že se bude nacházet v 90°úhlu k rámu. Potom silně energeticky stlačte páku dolů. Poté položte páku zpět k jejímu připevnění. Tak se vrátí boční strana zpět do uzavřené polohy.

**Pozor:** Aby mohl boční východ správně fungovat, dbejte na to, aby se v prostoru sklápění nenacházeli žádné předměty.

Jakmile je bezpečnostní zablokování bočních dveří uzavřeno (boční pojistná záklapka na pravé straně nad zámkem dveří u bočních dveří), nelze strana řádně otevřít a zavřít.



## Boční svěrač

Pomocí funkce stlačování/svíráání může být zvíře průběžně fixováno v kleci a umožňuje tak bezpečnější zacházení. Pomocí funkce svíráání jsou boční díly přitlačeny na tělo zvířete v kleci a zvíře je lehce demobilizováno.

Abyste mohli zvíře v kleci zafixovat, stlačte jednoduše páku svěrače dolů, až do momentu, že je zvíře fixováno. Pomocí svěracího zámku nad klecí zabráníte tomu, aby se boční díly sami uvolnily. I pokud je zvíře neklidné, zámek nepovolí. Abyste mohli opět povolit boční díly, zmáčkněte páku zpět do výchozí polohy. Abyste zajistili dlouhodobou bezporuchovou funkci klece, vyčistěte podlahu vždy po každém použití.



## Nastavení šířky

Především může být nastavena šířka stání v kleci dle každé velikosti zvířete. K tomu je potřeba nastavit páku svěrače rovnoběžně k horizontálnímu rámu klece. Potom položte páku pro nastavení šířky stání, která je nahore/napříč uprostřed klece, směrem ven. Jakmile je páka stlačena dolů, pozvedne se kompletně levá strana a je uvolněna. Nyní můžete Vaší nohou stranou pohybovat k jedné z pěti možných nastavení a poté pomalu pohnout pákou opět nahoru, tak, že bude strana aretovat. Potom položte páku zpět do její výchozí polohy napříč nad klecí.





## Trubková držadla

Na každé straně klece se nachází 5 trubkových držadel, která mohou být jednotlivě přiklapnuta a slouží k volnému přístupu k vrchní části těla zvířete. Jakmile je hlava zvířete pevně zafixována do hlavových vrátek, mohou být také všechny držadla současně zaklapnuta dolů, aniž by vzniklo nebezpečí, že se zvíře uvolní. Příležitostné mazání uzamykání olejem zlepšuje funkčnost. Pokud pracujete na pravé straně dveří, bezpečnostní západka pro boční východ by měla být uzavřena, abyste se vyvarovali náhlému otevření bočních dveří a s tím spojeného možného nebezpečí.




## Spodní panel

Abyste mohli mít přístup k nohám zvířete, zaklapněte jednoduše spodní panel na požadované straně dolů. Příležitostné mazání uzamykání olejem zlepšuje funkčnost. Pokud pracujete na pravé straně dveří, bezpečnostní západka pro boční východ by měla být uzavřena, abyste se vyvarovali náhlému otevření bočních dveří a s tím spojeného možného nebezpečí.



# FUNKCE FIXAČNÍHO ČELA Priefert

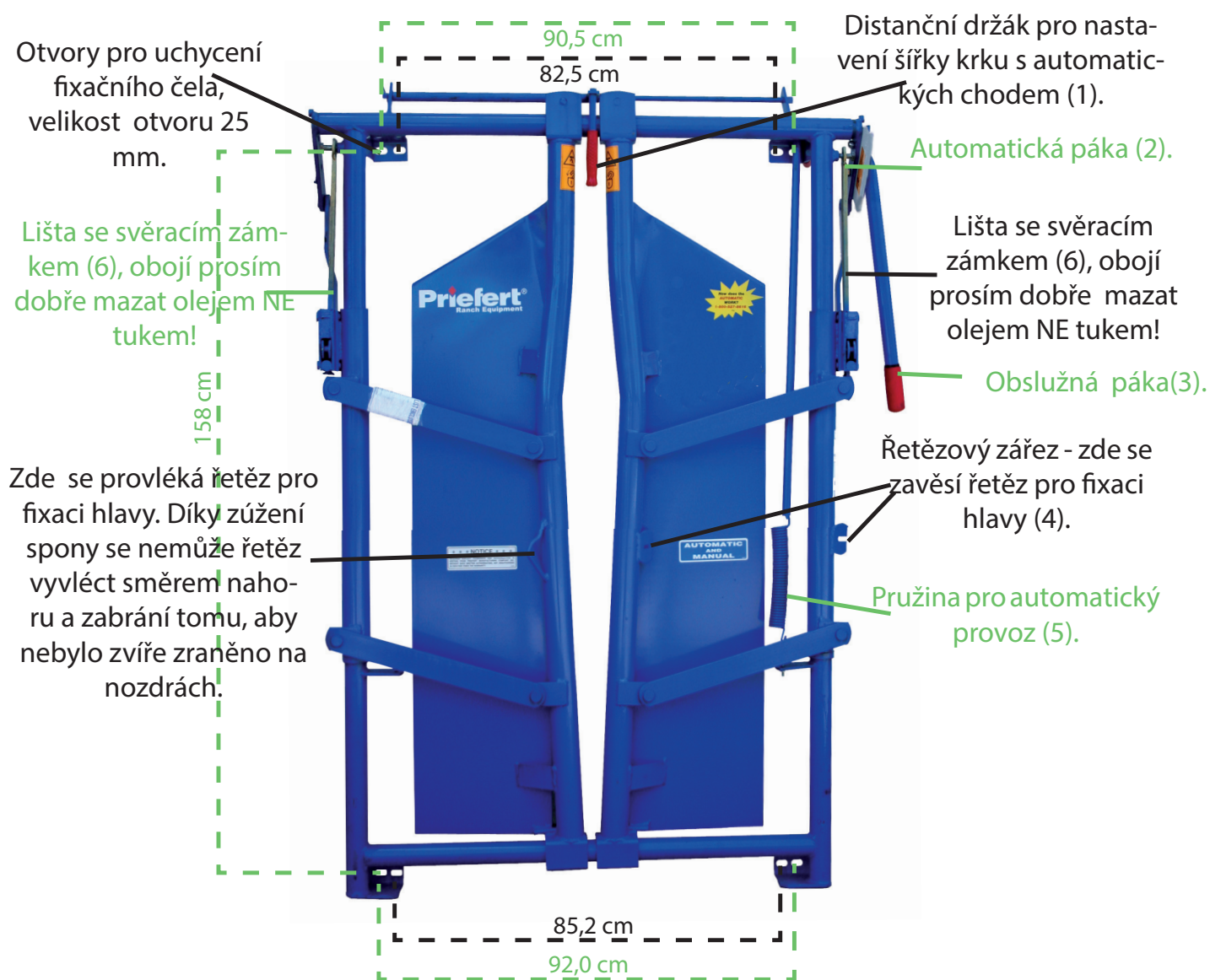

## NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO PROVOZU

### Automatický provoz

1. Automatickou páku (2) zaseknout do zářezu plechu obslužné páky. Tím se napne pružina (5) při otevření krční fixace.
2. Krční fixaci otevřít pomocí obslužné páky (3) a pomocí distančního držáku (1) nastavit požadovanou šířku krku.
3. Zvíře se samo zachytne, protože distanční držák (1) při tlaku zvířete na madlo krční fixace bude odlehčený, a pomocí gravitační síly se překlápí dolů. Pomocí napnutí pružiny (5) budou madla na krční fixaci těsně přitlačena na krk zvířete. Zvíře nemůže samo krční fixaci otevřít, neboť tomu zabrání svěrací zámkem (6).
4. Zvíře můžete jednoduše propustit pomocí obslužné páky vpřed (3).





# NASTAVENÍ MANUÁLNÍHO PROVOZU

## Manuální provoz

1. Automatickou páku (2) zvednout nahoru, aby nebyla zaseklá v zářezu u plechu od obslužné páky.
2. Krční fixaci otevřít obslužnou pákou (3).
3. Jakmile se hlava zvířete dostane do chytacího madla krční fixace, uzavřete krční fixaci obslužnou pákou (3).
4. Poté, co jste zvíře ošetřili, můžete ho jednoduše pomocí obslužné páky (3) propustit vpřed.

Přestavba obslužné páky na druhou stranu je možná. Musí k tomu být přebudovány - obslužná páka, automatická páka a pružina.

## POUŽITÍ ŘETĚZU PŘI FIXACI HLAVY



Zde se provléká řetěz pro fixaci hlavy. Díky zúžení spony (3) se nemůže řetěz vyvléct směrem nahoru a zabrání tomu, aby nebylo zvíře zraněno na nozdřích.

Zásek pro uchycení řetězu (1).

Zásek pro uchycení řetězu (2).

## Pozor!!!

Uvolněte vždy nejdříve řetěz na řetězovém záseku (1) na pravém rámu fixačního čela, jinak hrozí nebezpečí přiskřípnutí rukou.

Servis zajišťuje firma:



ALM centrum s.r.o.  
Dubovsko 277  
Vizovice 76312

tel.: +420 606 255 251  
tel./fax: +420 577 454 459  
e-mail: info@almvizovice.cz  
web: www.almvizovice.cz

# ZÁRUČNÍ LIST

## Záruční podmínky

Záruční list patří k prodávanému výrobku odpovídajícího typu a výrobního čísla jako část jeho příslušenství. Je třeba jej předložit při každé reklamaci. Za předpokladu dodržení záručních podmínek poskytujeme spotřebiteli záruční dobu

měsíců

ode dne prodeje.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené vnějšími vlivy, jako jsou například poškození způsobené živelnými pohromami, nevhodné provozní podmínky, poškození při dopravě a manipulaci, nebo je-li výrobek používán v rozporu s návodem k používání. Nárok na záruku zaniká rovněž v případě neoprávněného zásahu majitelem nebo jinou osobou (organizací).

Při dodržení záručních podmínek a po předložení dokladu o koupi a správně vyplněného záručního listu odstraní naše servisní organizace bezplatně veškeré poruchy způsobené výrobními vadami nebo vadným materiálem tak, aby mohl být výrobek řádně užíván.

Prodávající je povinen řádně a úplně vyplnit tento záruční list. Neúplný nebo neoprávněně měněný záruční list je neplatný. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Doporučujeme Vám společně se záručním listem a dokladem o koupi uschovat i doklady o provedení opravy. Pokud bude při opravě zjištěno, že se na uplatňovanou závadu nevztahují uvedené záruční podmínky, uhradí základy s jejím odstraněním zákazník.

Název a typ výrobku: .....

Datum prodeje: .....

Razítko prodejce:

